



Desinfectante Cuaternario No. 5L/5H



- **DESCRIPCIÓN**

3M Limpiador Desinfectante Cuaternario es un producto concentrado, diseñado para ser diluido y utilizado con el dosificador Twist and Fill™.

El producto 3M Limpiador Desinfectante Cuaternario concentrado de un solo paso, es usado en hospitales como desinfectante por su efectividad contra un amplio espectro de bacterias y virus, incluyendo la Hepatitis B, Hepatitis C y el virus HIV (virus del sida), fungicida, inhibe el crecimiento de moho y hongos y sus olores cuando es usado directamente.

Este producto cumple con AOAC, Eficiencia en estándares de desinfectantes para hospitales y está aprobado como desinfectante de un solo paso, limpiador, fungistático y virucida, es efectivo en agua con dureza mayor a 400 ppm y en presencia de 5% de suero contaminado, el producto listo para usarse contiene 848 ppm de QUAT..

- **ESPECIFICACIONES**

Concentrado:

- pH aproximado: 12.6
- Punto de Inflamabilidad: 56.1 °C
- Solubilidad en agua: Completa
- Gravedad Especifica: 1.0
- Viscosidad: < 100 cps
- Apariencia: Líquido transparente.
- Color: Verde
- Olor: Característico

Diluido:

- pH aproximado: 9.6
- Punto de Inflamabilidad: N/A °C
- Solubilidad en agua: Completa
- Gravedad Especifica: 1.0
- Viscosidad: < 100 cps

- **APLICACIONES**

- Usado como desinfectante en superficies duras no porosas lavables.
- Hospitales, casas de enfermería, casas de limpieza de hospitales, oficinas médicas y dentales.
- Escuelas, gimnasios, cuartos de regaderas, sanitarios públicos.
- Restaurantes, cocinas institucionales y plantas procesadoras de alimentos.
- Clínicas veterinarias, perreras, tiendas de mascotas y farmacias.

- **INSTRUCCIONES DE USO**

1. Dosificar el 3M Limpiador desinfectante Cuaternario con el dosificador Twist and Fill, Usar

3M MEXICO S.A DE CV.
Av. Sta Fe No 190
C.P. 01210 México D.F.

F-3020-70071312253 . V1

3M NO OTORGA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIALIZACIÓN O DE USO PARA UN PRODUCTO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación. Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, algunos de los cuáles son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.

LIMITACIÓN DE REPARACIÓN Y CONDICIONES:

Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE 3M, SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.



Desinfectante Cuaternario No. 5L/5H



una botella o recipiente debidamente etiquetados. Estabilidad bactericida de la solución lista para usarse :

2. Pruebas confirman que el uso de la solución lista para usarse, cuando se almacena en contenedores como botellas con rociador debidamente selladas, es efectiva por más de un año, si la solución esta visiblemente sucia o contaminada deseche esta y prepare solución nueva, siempre use contenedores limpios y debidamente etiquetados para almacenar el producto. La estabilidad bactericida del producto no aplica cuando, los contenedores, cubetas y botellas están abiertos.

Guía de aplicación para control de moho, hongos, desinfección, virucida y fungicida.

1. Aplicar la solución de diluido sobre las superficies duras no porosas, humedecer completamente con un trapo, mop, esponja por rociado o inmersión. Las superficies a tratar deberán estar húmedas con el producto por 10 minutos. Secar las partes húmedas con un trapo limpio o esponja, puede dejar secar al aire, para áreas con suciedad pesada es necesario realizar una limpieza preliminar.
2. Para aplicaciones por rociado es necesario usar equipo rociador grueso, rociar el producto a una distancia de 6 a 8 pulgadas de la superficie, frotar con un cepillo, trapo o esponja. No respirar el rocío de la solución.
3. Enjuagar todas las superficies que entran en contacto con alimentos como: mostradores, exterior de electrodomésticos, mesas y quemadores para cocina, usar agua limpia. No usar en utensilios de cristalería y platos.
4. Este producto no debe ser usado como un esterilizante de equipo que es introducido directamente al cuerpo humano. Este producto puede ser usado como producto de prelimpieza o descontaminante en equipo crítico o semicrítico, antes de la desinfección o esterilización de alto nivel.

Mata VIH-1, HBV y HCV, en la pre limpieza de superficies ambientales u objetos previamente sucios con sangre o con fluido corporal, en establecimientos sanitarios u otras superficies donde se espera que exista una suciedad de superficies inanimadas/objetos con sangre o fluidos corporales y estas superficies inanimadas y objetos pueden estar asociadas a una fuente potencial de transmisión de HIV-1 (SIDA), virus de la hepatitis B (VHB) y hepatitis C (VHC).

Instrucciones especiales para limpieza y descontaminación de VIH, VHB, VHC, en superficies u objetos sucios con sangre o fluidos corporales:

1. Equipo de protección personal: La limpieza se deberá realizar siempre usando guantes protectores, batas, mascarillas y protección ocular.

Procedimiento de limpieza:

Sangre y otros fluidos corporales que contienen VIH, VHB, VHC, limpiar profundamente las superficies y objetos antes de aplicar este producto.

Disposición de material infeccioso:

Materiales de limpieza de sangre y fluidos corporales así como ropa deberá ser desechada de acuerdo a regulaciones locales de residuos infecciosos.

Instrucciones para limpieza y desinfección de baños:

LIMITACIÓN DE REPARACIÓN Y CONDICIONES:

Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE 3M, SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.



Desinfectante Cuaternario No. 5L/5H



Retirar el exceso de suciedad antes de la desinfección. Vaciar la taza del baño o inodoro y aplicar producto sobre toda la superficie y debajo del borde con un trapo, mop, esponja o por rociado, cepillar completamente la superficie a limpiar y dejar que la solución del producto actúe mínimo por 10 minutos y enjuagar.

Para limpiar y desodorizar:

Aplicar producto sobre las superficies a limpiar y desodorizar, aplique usando un trapo, mop, esponja o por rociado, limpie y deje secar.

Para actividad fungicida:

El 3M Limpiador desinfectante QUAT es un efectivo fungicida contra el Trichophyton mentagrophytes (el hongo del pie de atleta) en áreas como cuartos de lockers, cuartos de ropa, áreas de sanitarios y regaderas así como gimnasios.

Instrucciones de uso como virucida en Veterinarias, cuidado de animales, tiendas de mascotas, zoológicos, desinfección de perreras:

Para limpieza y desinfección de superficies duras no porosas, equipos usados para la alimentación y contenedores de agua para los animales, utensilios, instrumentos, jaulas, perreras, establos, criaderos. Remover todos los animales y alimentadores del establecimiento, vehículos de transportación de animales, jaulas. Quitar toda la basura, excremento y estiércol de los pisos, paredes y superficies de las instalaciones ocupadas por los animales. Vaciar todos los utensilios de alimentación y bebederos de los animales. Limpiar toda la superficie con detergente o jabón y enjuagar con agua limpia. Saturar las superficies con solución del 3M Limpiador desinfectante QUAT por un periodo de 10 minutos. Limpie o deje secar al aire. Sumergir en solución de producto todo el equipo usado para el cuidado de los animales, así como palas horquillas y raspadores que se usan para eliminar basura y estiércol. Enjuagar todas las superficies que entran en contacto con los alimentos incluidos los equipos para alimentación y bebederos con agua potable antes de ser usados. Ventilar el local y otros espacios cerrados. No usar casa de animales o emplear equipo hasta que el tratamiento haya sido absorbido.

Uso en granjas locales: Sacar animales y alimentos del establecimiento, vehículos y recintos. Quitar toda la basura y estiércol de pisos, paredes y superficies de los corrales y establos y otros servicios e instalaciones ocupadas por los animales. Vaciar utensilios de uso para alimentación y bebederos limpiar todas las superficies con jabón o detergente y enjuagar con agua limpia. Saturar las superficies con solución de producto por un periodo de 10 minutos. Sumergir en solución de producto todos los utensilios de manipulación y sujeción de animales así como palas y rastrillos usados para la eliminación de basura y estiércol. Ventilar los locales vehículos, botes y otros espacios cerrados. No usar establos o emplear equipo hasta que el tratamiento haya sido absorbido o este seco, tallar completamente todos los utensilios que se usan para alimentar a los animales con jabón o detergente y enjuagar con agua limpia antes de ser usados.

- **EMPAQUE**

Caja con 6 botellas de 2 litros cada una.

3M MEXICO S.A DE CV.
Av. Sta Fe No 190
C.P. 01210 México D.F.

F-3020-70071312253 . V1

3M NO OTORGA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIALIZACIÓN O DE USO PARA UN PRODUCTO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación. Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, algunos de los cuáles son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.

LIMITACIÓN DE REPARACIÓN Y CONDICIONES:

Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE 3M, SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.